

# MRT Checkliste für Patienten

# HFX™

HFX ist eine umfassende Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen, bestehend aus einem Senza®-Rückenmarkstimulationssystem und unterstützenden Dienstleistungen.

*Ihr HFX™ Gerät ist unter bestimmten Bedingungen für Ganzkörper-MRT-Untersuchungen zugelassen.*

**Stellen Sie folgende Punkte sicher, falls ein Arzt eine MRT-Untersuchung bei Ihnen anordnet:**

1. Informieren Sie den Arzt, der die MRT-Untersuchung angeordnet hat, dass bei Ihnen ein Rückenmarkstimulationssystem implantiert ist.
2. Fragen Sie den Arzt, der Ihnen das System implantiert hat:
  - Ist die angeordnete MRT-Untersuchung für mein System unbedenklich?
3. Geben Sie bei der Terminvereinbarung zur MRT-Untersuchung folgende Informationen an das jeweilige Zentrum:
  - Dass bei Ihnen ein Nevro-Rückenmarkstimulator implantiert wurde
  - Ob bei Ihnen eventuell ein anderes Medizinprodukt implantiert wurde
  - Eine ausführliche Beschreibung Ihrer Produkte, einschließlich der Produktnummer des Implantats, der Elektroden und anderer implantierter Komponenten
  - Die Kontaktdaten des Arztes, der Ihr Gerät implantiert hat
  - Die MRT-Richtlinien, die online unter [www.nevro.com/manuals](http://www.nevro.com/manuals) abrufbar sind
4. Vor der MRT-Untersuchung muss bei allen Patienten, bei denen ein Senza-Gerät implantiert wurde, zunächst eine Impedanzprüfung vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig vor Ihrem MRT-Termin an Ihren HFX-Ansprechpartner um das weitere Vorgehen abzusprechen.
5. Bringen Sie Ihren Patientenausweis und Ihre Fernbedienung zum MRT-Termin mit. Wenn Sie Ihren Patientenausweis nicht verfügbar haben, wenden Sie sich bitte an Ihr HFX-Therapieteam.
6. Vergewissern Sie sich vor der MRT-Untersuchung, dass Ihr IPG aufgeladen und die Stimulation ausgeschaltet ist. Sie können die Stimulation mit Ihrer Fernbedienung ausschalten.
7. Schalten Sie das System nach erfolgter MRT-Untersuchung wieder mit Ihrer Fernbedienung ein. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt bestätigen, dass die vor der MRT-Untersuchung im Gerät programmierten Einstellungen wieder aktiviert sind.



PTRC1000



PTRC2300



PTRC2500

*Hinweis: Unterschiedliche Implantatmodelle, einschließlich Elektrodentypen, sind mit verschiedenen zulässigen Scan-Bedingungen verknüpft.*

*Bitte weisen Sie Ihren Arzt auf das MRT-Handbuch von Nevro hin, um die Sicherheit der Untersuchung zu gewährleisten. In der Zukunft können sich hinsichtlich der empfohlenen MRT-Einstellungen Änderungen ergeben. Die aktuellsten Informationen sind stets auf der Website [Nevro.com](http://Nevro.com) zu finden.*



© 2021 Nevro Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Nevro, Senza, Omnia, HFX, Relief Multiplied und die Nevro- und HFX-Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Nevro Corp. 2017181-DE Rev. D